

日本製

快適性・安全性を追及した飛沫感染予防グッズ

# フェイスガード

高い透過性で疲れにくい!!

透過率 89.8% パーセント

眼鏡・ゴーグル  
を付けたままで  
装着可能!



※シートは直接メガネに装着することもできます。

## 4つの特長

- 眼鏡やゴーグルを付けたまま装着可能
- 防曇処理加工されているから曇り難い
- 高透明で軽い(約 20g)長時間でも疲れ難い
- シート取り替え時に簡単に取り外せるミシン目付き

## ご使用者様の声



仕事：製造業 A さん

取り付けが簡単で、シートの交換も簡単にできました。  
また視界が良好で作業がしやすいです。



仕事：受付事務 B さん

とても軽くて着けていることを忘れてしまいます。  
来客されたお客様にも好評です。

## こんな方にお勧め

医療従事者・受付・レジ・接客業  
花粉症の方・等

## 製造・販売元 (共同企画品)

大協技研工業株式会社

神奈川県座間市栗原 920-3

TEL.046-252-9311

有限会社樹脂リードモデル

神奈川県座間市小松原 1-16-31

TEL.046-266-4131

## 製品仕様

製品名・フェイスガードセット

サイズ：H225mm×W265mm

材質：シート：PET (片面防曇処理)

フレーム：ABS 製 (緩衝材付き)

※フレーム及び緩衝材の色は任意となります。

※透過率は実測値であり保証値ではありません。

入り数：シート 1 枚、フレーム 1 個

## 交換部品

入り数：シートのみ 50 枚 / セット


※シート単体での販売となります。

※シートは直接汎用性のメガネに付けられます。

※対応メガネフレーム幅は 5mm~10mm となります。

## 装着方法


ご注意下さい

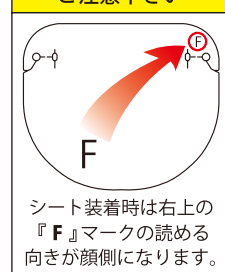

シート装着時は右上の『F』マークの読める向きが顔側になります。



① 突起物を上向きにフレームを挿入

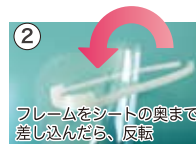

② フレームをシートの奥まで差し込んだら、反転



③ 『突起物』が下にあることを確認



④ 両側のシート切り込みをフレームにかぶせ「完了」



QRコードを読み込むと「装着方法」の動画へ移動します